

# Babyplan®

## Varhainen Raskaustesti Puikko

Käyttöopas



Version 1.0  
FI 17012017  
Cat.No. W1-M14 10mIU

Babyplan varhainen raskaustesti on nopea raskaustesti, jonka voit helposti suorittaa itse. Se havaitsee virtsasta ihmisen koriongonadotropiinin ("hCG"), jota erittyy virtsaan raskauden alkuvaiheessa. Vain itse suoritettavaan in vitro - testaukseen. Vain ulkoiseen käyttöön.

# Miten testi tehdään

## Testipakkauksen sisältö

- Raskaustesti ja kosteudenpoistaja. Kosteudenpoistaja on ainoastaan säilöntää varten eikä sitä tarvita testin tekemiseen.
- Käyttöohje.

## Mitä muuta tarvitset?

- Puhtaan ja kuivan astian, muovisen tai lasisen, virtsan keräämiseen.
- Kellon.

## Milloin testi tehdään?

Virtsanäytteen voi ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa, mutta **aamun ensimmäistä virtsanäytettä** suositellaan, **sillä sen hCG-pitoisuus on suurin.**




Tarkoittaa tärkeää tietoa

## Miten testi tehdään



1. Jotta voit aloittaa testin; avaa sinetöity pakkaus repimällä loven kohdalta. Ota testi pakkauksesta.
2. Pidä testin kädensijasta kiinni yhdellä kädellä. Vedä toisella kädellä imupinnan päällä oleva suojakorkki pois.

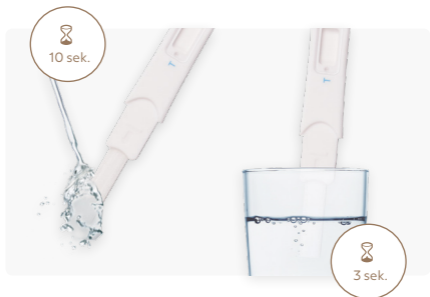

3. Peg den absorberende del af testen ned ad og sæt den ind i urinstrålen i mindst 10 sekunder så du er sikker på den bliver tilstrækkelig våd.\*

Alternativt kan urinen opsamles i en ren tør beholder. Herefter holdes testens absorberende del ned i urinen i mindst 3 sekunder.



\*Älä virtsaa nuolella merkityn kohdan toiselle puolen.



4. Laita suojakorkki takaisin paikoilleen ja odota, kunnes värilliset viivat tulevat näkyviin. Positiiviset tulokset voidaan havaita 1 minuutin kuluessa. Ollaksesi täysin varma negatiivisesta tuloksesta on **testin koko reagointiaika (3 minuuttia) odotettava loppuun saakka.**



Älä lue tuloksia 5 minuutin jälkeen.

## Miten tulos luetaan?



### **Negatiivinen (ei raskaana):**


Vain yksi värillinen viiva muodostuu kontrollialueelle. Testialueelle ei muodostu värillistä viivaa. Tämä tarkoittaa, että et ole raskaana.



### **Positiivinen (raskaana):**

Värilliset viivat muodostuvat sekä kontrolli- että testialueelle. Tämä tarkoittaa, että olet raskaana. Viivojen väri voi vaihdella, koska hCG- pitoisuus virtsassa vaihtelee raskauden eri vaiheissa.



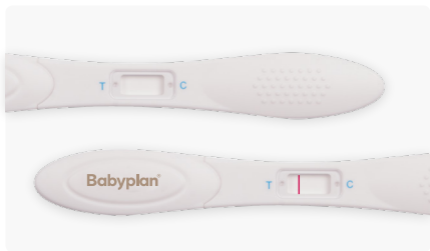

### **Epäonnistunut:**

Näkyviä viivoja ei muodostu lainkaan, tai näkyvä viiva muodostuu ainoastaan testialueelle, ei kontrollialueelle. Tee testi uudelleen uudella testipuikolla. Mikäli testaus epäonnistuu jälleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen, ja ilmoita testin eränumero.



Jos viiva testialueella on haalea, on suositeltavaa tehdä testi uudelleen 48 tunnin kuluttua.

## Mitä tehdä kun tiedät tuloksen

### **Jos tulos on positiivinen (kaksi viivaa)**

Keskustele lääkärisi kanssa. Lääkäri on syytä vahvistaa raskausdiagnoosi. Jossain olosuhteissa testi voi antaa valheellisen positiivisen tuloksen. Lääkäriltä saatte myös tietoa ja neuvoja raskautta koskien. Lue myös "Rajoitukset".

### **Jos tulos on negatiivinen (yksi viiva)**

Jos epäilet kuitenkin raskautta (esim. ei kuukautisvuotoa), voit tehdä testin uudelleen parin päivän kuluttua. Jos testi antaa jälleen negatiivisen tuloksen, keskustele lääkärisi kanssa. Lue myös "Rajoitukset".

## Kuinka testi toimii?

Ihmisen koriongonadotropiini (hCG) on hormoni, jota kehittyvä alkio erittää virtsaan pian hedelmöittymisen jälkeen. Raskaustesti sisältää vasta-aineita, jotka reagoivat kyseisen hormonin kanssa. Kun testi kastetaan virtsaan, kapillaari-ilmiö kuljettaa virtsanäytettä testin kalvoa

pitkin. Kun virtsanäytteen hCG saavuttaa testialueen, kalvolle muodostuu värillinen viiva. Testi on negatiivinen, jos värillistä viivaa ei muodostu. Testillä on oma kontrollitoiminta. Jos testi on tehty oikein, muodostuu kontrollialueelle värillinen viiva.

## **Varoitukset**

1. Pakkauksen sisältö on vain ulkoiseen käyttöön. Älä niele.
2. Hävitä testi ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Testin voi tehdä vain kerran.
3. Älä käytä testiä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
4. Älä käytä testiä, jos testipakkaus on vahingoittunut tai avattu.
5. Säilytä lapsilta ulottumattomissa.

## **Säilytys ja stabiilitteetti**

Säilytä avaamattomana 4°C- 30°C lämpötilassa viimeiseen käyttöpäivämäärään asti. Säilytä auringonvalolta suojattuna. Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa. ÄLÄ

**JÄÄDYTÄ.** Avaa testipakkaus vain hetkeä ennen testin suorittamista.

## **Rajoitukset**

1. Niin kuin missä tahansa diagnoosissa, tulee lopullinen vahvistus raskaudesta saada lääkäriltä.
2. Jos virtsanäyte on laimentunut, se ei välttämättä sisällä riittävän suurta hCG-pitoisuutta. Jos raskautta kuitenkin epäillään, tulisi näyte ottaa aamuvirtsasta ja suorittaa testi uudelleen 48 tunnin kuluttua.
3. Raskauden alkuvaiheessa voi hCG:n alhainen pitoisuus antaa negatiivisen tuloksen. Jos raskautta kuitenkin epäillään, tulisi uusi testi tehdä vähintään 48 tunnin kuluttua.
4. Tietyissä olosuhteissa voi hCG:n pitoisuus nousta muunkin kuin raskauden aiheuttamana. Tämän vuoksi ei virtsanäytettä tulisi käyttää raskauden diagnosointiin ennen kuin muut syyt ovat poissuljettuja.
5. Normaalialue raskautta ei voida erottaa kohdun ulkopuoleisesta raskaudesta

vain hCG-pitoisuuksien avulla. Myös keskenmeno voi häiritä testitulosta.

6. hCG:n perustuvat hoidot voivat antaa valheellisen tuloksen. Keskustele lääkärisi kanssa.
7. Tämä testi on kvalitatiivinen seulontatesti. Sitä ei ole suunniteltu hCG-pitoisuuden kvantitatiiviseen määrittämiseen.
8. Laite soveltuu vain ihmisen virtsan testaamiseen.
9. Epäpuhtauksia sisältävä näyte tai häiritsevät aineet virtsassa voivat aiheuttaa väärän tuloksen.
10. Likainen testilaitte voi aiheuttaa väärän tuloksen.

## **Odotetut tulokset**

Negatiivinen tulos on odotettavissa terveiltä ei raskaana olevilta naisilta ja terveiltä miehiltä. Vaikka hCG-pitoisuudet vaihtelevat raskauden alkuvaiheessa, voi Babyplan varhainen raskaustesti havaita raskauden jopa ensimmäisten poisjääneiden kuukautisten oletettua alkamisajankohtaa seuraavana päivänä.

Testiä voidaan käyttää aiemminkin, mutta tällöin sen tarkkuus on pienempi.

## Suorituskyvyn tunnuslukuja

### **Herkkyys:**

Babyplan varhainen raskaustesti havaitsee virtsassa olevan hCG:n, jos sen määrä on 10mIU/mL tai enemmän.

### **Tarkkuus:**

Babyplan varhaisen raskaustestin tarkkuus on määritetty ristireaktiotutkimuksissa luteinisoivan hormonin (hLH), follikkelia stimuloivan hormonin (hFSH) ja kilpirauhasta stimuloivan hormonin (hTSH) tunnettujen määrien kanssa. Negatiivinen tulos saatiin kaikista testeistä, joissa arvot olivat 300 mIU/ml hLH, 300mIU/ml hFSH ja 1000  $\mu$ IU/ml hTSH.

## Kysymyksiä ja vastauksia

### **Kahden eri testin kontrolliviivoissa on suuri ero. Onko syytä huolestua?**

Ei. Kontrolliviivan värin vaihtelu ei vaikuta testitulokseen.

## **Voiko tuloksen tulkita 5 minuutin jälkeen?**

Ei. Tulos täytyy lukea 5 minuutin sisällä. Vaikka positiivisen tuloksen ei pitäisi muuttua moneen päivään, negatiivinen tulos voi muuttua valheelliseksi positiiviseksi tulokseksi vain muutaman minuutin kuluttua testausajan päätyttyä. Testin tulos on aina parasta lukea viiden minuutin sisällä testaamisesta ja sitten hävittää testi sekaannusten välttämiseksi.

## **Vaaleanpunainen taustaväri ja pystysuora juova ilmestyivät testiin testiaikana?**

Onko syytä huolestua? Ei. Jokaisen virtsanäytteen kemiallinen koostumus vaihtelee, kuten myös testausympäristön kosteus. Tällaiset vaihtelut fyysisissä olosuhteissa voivat aiheuttaa pystyraidoitusta ja/tai vaaleanpunaisen taustavärin, mutta eivät vaikuta testin tulokseen. Kunhan kontrolliviiva tulee näkyviin viidessä minuutissa, testi toimii oikein.

## Selitys pakkauksen symboleille



Suojattava  
auringolta



Säilytettävä  
kuivassa



Säilytettävä  
4 - 30°C



Ei saa käyttää  
uudelleen



Parasta ennen  
päivämäärä



Huom! Lue käyttöohjeet  
ennen käyttöä



Vain ulkoiseen käyttöön





W1-M14 10mlU



0537



Valmistaja:

**Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.**

No. 8, Lizhishan Road, Science City

Luogang District

510663 Guangzhou, Kiina

PUH: 0086-20-8711-1194

Sähköpostiosoite: [sales@wondfo.com.cn](mailto:sales@wondfo.com.cn)



Valtuutettu edustaja:

**Qarad b.v.b.a.**

Cipalstraat 3

B-2440 Geel, Belgia



**Babyplan®**

Kun suuria unelmia toteutetaan on pienillä asioilla usein merkitystä. Anna Babyplanin auttaa sinua kasvattamalla mahdollisuuksia tulla raskaaksi.

**[www.babyplan.fi](http://www.babyplan.fi)**